



## **OrCam MyEye 2 Software Update**

### **Come Aggiornare il vostro Orcam:**

***Se avete già precedentemente connesso il vostro dispositivo alla rete WiFi:***

1. Accendete il vostro dispositivo, inserite l'alimentatore fornito per la ricarica e collocatevi nel range della rete WiFi.
2. Il vostro dispositivo si conatterà automaticamente alla rete WiFi, scaricherà ed installerà il nuovo software.
3. Seguite le istruzioni audio per sapere quanto tempo rimane al completamento.

***Per connettere il dispositivo ad una rete WiFi per la prima volta:***

1. Assicuratevi di essere in prossimità di una connessione internet WiFi protetta da password.
2. Collegate il vostro Orcam all'alimentatore fornito per caricare le batterie. Assicuratevi che si stia caricando
3. Da un pc o uno smartphone connettetevi al seguente sito:  
<https://www.orcam.com/it/wifiset/>
4. Inserite le credenziali WiFi richieste: username e password negli appositi campi. Premete sul pulsante sottostante per generare un QR Code.
5. Un QR Code e una frase tipo: "Orcam per favore...."apparirà a schermo. Puntate il dito o fate in modo che Orcam legga quella frase.
6. La telecamera leggerà la frase e scansionerà automaticamente il QR Code. Tenete la testa in posizione fino a sentire che la connessione WiFi è stata stabilita con successo. Orcam annuncerà il nome della rete WiFi.
7. Una volta connesso il processo di download e installazione partirà automaticamente. Il tempo utilizzato per il download dipende dalla velocità della vostra connessione internet e dalla vicinanza con il router WiFi. Se il download non inizierà entro qualche minuto disconnettete l'alimentatore e riavviate il dispositivo, quindi riprovare i passaggi precedenti.

#### **Vision Dept S.r.l.**

Sede Legale: Via G. B. Morgagni 6, 20129 Milano

Capitale sociale: € 95.000 i.v. – PIVA/CF 09346340962 – REA MI 2084351

Telefono: 02/29534862 Fax: 02/73965110 Sito web: [www.visiondept.it](http://www.visiondept.it) Email: [info@visiondept.it](mailto:info@visiondept.it)